



BİORAD® ENZİMO

Ön Temizlik ve Dezenfeksiyon



Su Miktarı	Biorad Enzim Miktarı (%5)
5 L	25 ml
10 L	50 ml
15 L	75 ml
20 L	100 ml



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE şişe	20×1 L
5 litre PE bidon	4×5 L
10 litre PE bidon	1×10 L

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Enzim (Amilaz, Lipaz, Proteaz), Glikol türevleri, Noniyonik surfektanlar Didesildimetilamanyumklorür, Antikorozyf maddeler ve yardımcı maddeler.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

ENZİMO 3'lü Enzim içeren konsantre enzimatik alet temizleyicisi, dezenfektandır. Tıbbi ve cerrahi aletler ile ısıya dayanıklı ve dayanıksız malzemelerin enzimatik temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Aletler üzerindeki organik kirleri temizler, aynı zamanda dezenfeksiyon işlemini yapar. Korozyonu engeller. Aldehit, fenol ve fosfat içermez.

KULLANIM ALANLARI:

İşlem görmüş tıbbi ve cerrahi aletler, MIC cerrahi aletleri dahil, endoskoplar, anestezi malzemeleri, dental aletler, ısıya dayanıklı ve dayanıksız malzemeler, alet dezenfeksiyon kuvvetlerinde manuel, ultrasonik yıkama makinelerinde ve otomatik yıkama makinelerinde, ayrıca plastik, seramik, porselen ve camdan imal edilen tüm aletlerin enzimatik temizliği ve dezenfeksiyonu için kullanıma uygundur. Wolf, Storz, Fujinon, Pentax, Olympus marka endoskoplarında temizleyici ve dezenfeksiyonu işleminde yardımcı olarak kullanımı önerilir.

KULLANIM ŞEKLİ

Bakterisid, Fungusid, Virüsüd, Mikobakterisid

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Ürün % 0,5 oranında seyreltilerek kullanılır. Alet dezenfeksiyon kuvveti içerisine yeterince su koyunuz, dozaj pompası yardımı ile önerilen aşağıdaki tabloya uygun konsantrasyonda Biorad Enzimo ekleyiniz.

www.famed.com.tr