



BIORAD®

ENZYM

Ön Temizlik ve Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE şişe	20×1 L
5 litre PE bidon	4×5 L
10 litre PE bidon	1×10 L

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Enzim (Amilaz,Lipaz,Selüloz,Mannanaz,Proteaz), Noniyonik tensidler, Benzalkonyumklorür, Antikoroziv maddeler ve yardımcı maddeler.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

ENZYM 5'li Enzim içeren konsantre enzimatik alet temizleyicisi, dezenfektandır. Tıbbi ve cerrahi aletler ile ısıya dayanıklı ve dayanıksız malzemelerin enzimatik temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Aletler üzerindeki organik kirleri temizler, aynı zamanda dezenfeksiyon işlemini yapar. Korozyonu engeller. Aldehit, fenol ve fosfat içermez

KULLANIM ALANLARI:

İşlem görmüş tıbbi ve cerrahi aletler, MIC cerrahi aletleri dahil, endoskoplar, anestezi malzemeleri, dental aletler, ısıya dayanıklı ve dayanıksız malzemeler, alet dezenfeksiyon kuvvetlerinde manuel, ultrasonik yıkama makinelerinde ve otomatik yıkama makinelerinde, ayrıca plastik, seramik, porselen ve camdan imal edilen tüm aletlerin enzimatik temizliği ve dezenfeksiyonu için kullanıma uygundur. Wolf, Storz, Fujinon,Pentax,Olympus marka endoskoplarında temizleyici ve dezenfeksiyonu işleminde yardımcı olarak kullanımı önerilir.

KULLANIM ŞEKLİ

Bakterisid, Fungusid, Virüs, Mikobakterisid

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Ürün %0,4 ile %3 oranlarında seyreltilerek kullanılır. Alet dezenfeksiyon kuvveti içerisinde yeterince su koyunuz, dozaj pompası yardımı ile önerilen konsantrasyonlarda Biorad Enzym ekleyiniz.

Su Miktarı	Biorad Enzym Miktarı (%5)	Biorad Enzym Miktarı (%1)	Biorad Enzym Miktarı (%3)
5 L	20 ml	50 ml	150 ml
10 L	40 ml	100 ml	300 ml
15 L	60 ml	150 ml	450 ml
20 L	80 ml	200 ml	600 ml