



BIORAD®

READY SPRAY

Yer Yüzey Dezenfektanları



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE şişe	20×1 L
5 litre PE bidon	4×5 L

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Benzalkonyumklorür, Didecyldimethylammoniumchloride ve yardımcı maddeler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Ready Spray kullanıma hazır, bileşimindeki kuaterner amonyum bileşikler sayesinde antimikrobiyal etki spektrumu geniştir. Aldehit, fosfat ve alkol içermez. Korozyon inhibitörü içerdiğinden, metal aksamı yüzeylerde kullanımı önerilir. Ready Spray, cam, seramik, silikon, plastik (pleksiglas dahil), ahşap ve paslanmaz çelik malzeme ile uyumludur.

KULLANIM ALANLARI:

Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan; Özellikle küvözlerde, hastanelerdeki tüm yatay ve dikey yüzeylerin özellikle PVC/epoksi alanların, yerlerin, duvarların, ultrason proplar, küvözler, dental alanda kullanılan aletler ve mikromotor başlıkları, KBB ünitelerinde dezenfeksiyon zorunlu tıbbi cihaz ve makinelerin temizliğini aynı zamanda dezenfeksiyonunu, ameliyathanelerin, yoğun bakım odalarının temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Ready Spray, tüm yatay ve dikey yüzeylerde kullanıma uygun, hazır püskürtme dezenfektanıdır. 30cm- 40 cm mesafeden püskürtülür. Etki göstermesi için 30 sn beklenir. Temiz bir bezle silinir ve kurumaya bırakılır.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid , Fungusid, Virüs, Mikobakterisid, Tuberkülosid

www.famed.com.tr