



BIORAD®

HIPO

Endoskop ve
Alet Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE şişe	20x1 L
5 litre PE bidon	4x5 L
10 litre PE bidon	1 adet

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Sodyumhipoklorittir

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Ürünün etken maddesi olan klor hücreler için anahtar rol oynayan enzimlerin yıkımını sağlayarak hücre ölümlerine neden olur.

KULLANIM ALANLARI:

Hipo tıbbi ve cerrahi aletler temizliği ve dezenfeksiyonu için kullanılır. Metaller, plastikler, kauçuk, lastik, cam, ahşap, porselen, cam, seramik, silikon, plastik, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerle uyumludur.

KULLANIM KONSANTRASYONU:

Dezenfekte edilecek yüzeydeki organik madde miktarına bağlı olarak 1/10 yada 1/100 oranında sulandırılır. 1/10'luk dilüsyonu yere dökülen etrafa sıçrayan kanların dezenfeksiyonu için önerilmektedir. Çamaşır makinesi yada manuel yıkamalarda 1 litreye 5ml ilave edilir. Kısa süreki etki 5dk'dır

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Virüs, Tüberküloz, Mikobakterisid.

www.famed.com.tr