



BIORAD®

LIQUID PA

Endoskop ve
Alet Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE şişe	20×1 L
5 litre PE bidon	4×5 L
10 litre PE bidon	1 adet

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Perasetik asit, Hidrojen Peroksit , Anti korozif maddeler ve deiyonize su içerir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Liquid PA endoskop yıkama makinalarında ve manuel kullanıma uygun yüksek düzey alet ve endoskop dezenfektanıdır. Aktive edildikten sonra kullanıma hazır hale gelir.Ön temizliği yapılmış aletler için kullanılır. 5 dakikada dezenfeksiyon ve sterilizasyon yapar etkinliğini yitirmeden maksimum14 gün kullanım özelliği vardır. Test stripleri ile kolayca kontrol edilebilir. Tıbbi aletlerin, flexible ve rijid endoskopların dezenfeksiyonu için kullanılan, fenol, klor ve formaldehit içermeyen ,renksiz,kokusuz, toksik olmayan kullanıma hazır alet dezenfektanıdır

KULLANIM ALANLARI:

Liquid PA Solüsyonu, her türlü cerrahi aletlerin, ısıya dayanıksız anestezi aksesuarlarının (maske ambu, vb) ve Karlstorz, Olympus, Pentax, Fujinon, flexible ve rijid gibi tüm sabit ve esnek endoskopların dezenfeksiyonu yanı sıra her türdeki cerrahi aletin ve laparoskopi aletlerinin dezenfeksiyonu için çok uygundur. Endoskop kılıflarında paslanma, korozyon, yumuşama, renk değişikliği gibi zedelenmelere neden olmaz. Liquid Pa solüsyonu solüsyonu kauçuk, plastik, cam, Pvc, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerden yapılmış tıbbi cihazların dezenfeksiyonuna uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ

Liquid PA solüsyonu baz ile aktifleştiricinin karıştırılması ile hazır hale gelir. Aktivatör şişesinin tamamını baz bidonuna boşaltınız homojen hale gelene kadar çalkalayınız.Ön temizliği yapılmış aletleri Liquid PA solüsyonuna tamamen daldırınız ve 5 dakika bekleyiniz. Daha sonra aletleri solüsyondan alıp bol su ile durulayınız ve kurulayınız. Otomatik endoskopi yıkama ve dezenfeksiyon makinalarında kullanılırken üretici tarafından verilen talimatlara uyunuz

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Sporosid, Virüsid, Tüberkülosid, Mikobakterisid.

www.famed.com.tr