



BIORAD®

POWERFUL PA

Endoskop ve
Alet Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
HDPE kova	1 x 10 kg
HDPE kova	20 x 1 kg
HDPE kova	4 x 5 kg

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Tetraacetylenediamine, Sodium Perborate, Enzimler (Amilaz, Lipaz, proteaz), Korozyon inhibitörleri ve yardımcı malzemeler.

KULLANIM ALANLARI:

Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopi aletler, flexible ve rijid endoskopların yüksek düzey dezenfeksiyonunu sağlar. Endoskop kılıflarında paslanma, korozyon, yumuşama, renk değişikliği gibi zedelenmelere neden olmaz. Plastik, PVC, cam, silikon seramik, akrilik, polikarbon, polimer, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerden yapılmış tıbbi cihazların dezenfeksiyonuna uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ

%1 oranında seyreltilerek kullanılır. %1lik solüsyon 10 gram (içindeki 1silme dozaj kaşığı) BIORAD POWDER PA'yı 900 ml ılık su (20-25°C) içinde homojenizasyon elde edilinceye kadar karıştırınız. 10 dakika aktivasyondan sonra hazırlanan solüsyon artık kullanıma hazırdır. Hazırlanan çözelti 24 saat boyunca kullanılabilir ancak aşırı kirlenmiş solüsyon yenisi ile değiştirilmelidir.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Sporosid, Virüs, Tüberkülosid, Mikobakterisid.