

RELIABLE

Yüksek Düzey Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı
Medikal Ekipman ve Yüzeyler İçin Aldehitsiz

Açıklama	Ambalaj
1 Litre PE Şişe	12x1 Litre
2 Litre PE Şişe	8x2 Litre
5 Litre PE Bidon	4x5 Litre

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Analiz Adı	Olması Gereken Değerler
Görünüm	Berrak, homojenlik
Renk	Rensiz
Koku	Hoş kokulu
Ph (25°C) Derişik	6,0 - 8,0
Korroziflik deneyi	Deneye Uygun
Yoğunluk 25°C (g/ml)	0,986 ± 0,02



HBV
Hepatitis B
Virus

MRSA

HIV
AIDS
Virus





FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Preparat Tipi

BIORAD Reliable kullanıma hazır, yüksek etkili tıbbi alet dezenfektanıdır. İki cerrahi müdahale arasındaki medikal cihazların ve yüzeylerin çabuk dezenfeksiyonunda kullanılabilir. Etkin maddelerinin yanında Benzotriazole korozyon inhibitörü, surfektan ve excipient maddelerine dayalıdır. Aldehit, fenol içermez, toksisitesi çok düşüktür. Korozyon inhibitörü içerdiğinden, metal aksamlı yüzeylerde rahatlıkla kullanılır. Ayrıca kontaminasyon kaynağı olabilecek aletlerin ve yüzeylerin sık dezenfeksiyonunda, her türlü duvar, zemin ve envanter gibi alanların temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılabilir. **BIORAD Reliable** aldehit içermediği için kullanımı çok uygundur.

Antimikrobiyal Özellikleri

Bakterisid (Tbc, Mycobacterium terrae, MRSA), etki 1 dakika
Fungusid, etki 15 dakika
Sporosid, etki 15 dakika
Virüs inaktive edici




Kullanım Alanları

Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan cerrahi ve tıbbi aletler, anestezi malzemeleri, ısıya dayanıksız bükülür ve bükülmez endoskoplar, gözlerin virüs enfeksiyonunu önlemek için göz doktoru muayenehanelerinde ve gözlükçülerde, diş hekimliğinde kullanılan, frezler, dental cerrahi malzemeleri, cam ve porselen, seramik, metal aletlerin temizliği ve dezenfeksiyonuna yardımcı olur. Manüel ve ultrasonik yıkama makineleri için kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli

Daldırma: BIORAD Reliable solüsyonundan dezenfeksiyon kuvetine yeterince boşaltılır. Hasarsız, sağlam aletleri kullandıktan hemen sonra çözelti içine daldırılır. Tüm yüzeyler ve boşluklar çözelti ile ıslanmış olmalıdır. Etki süresi geçtikten sonra aletler temiz su ile yıkanır ve kuruması için beklenir. Tüm sirkülasyon prosedürleri için uyumludur. Dezenfeksiyon çözeltisi 15 gün boyunca kullanılabilir. Bununla birlikte çözeltide gözle görülür bir kirlenme meydana gelirse yenisi ile değiştirilmesi tavsiye edilir.

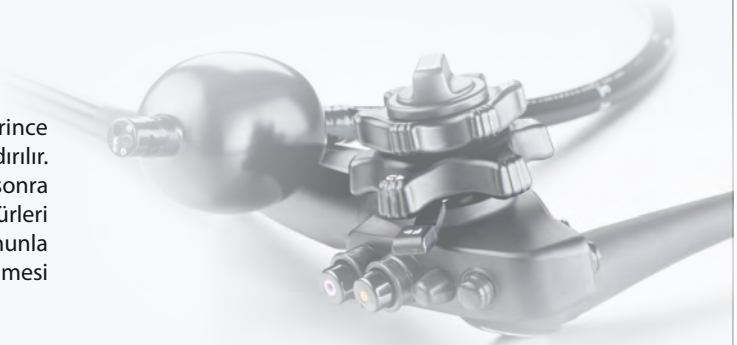

Kullanım Dozu

BIORAD Reliable kullanıma hazırdır, seyreltmeyiniz! Kullanım Dozu (100/100)'dür

Bileşimi

100 ml. çözelti: %0,59 Bis (3-aminopropyl)dodecylamin, %0,72 didecylmethylpoly(oxethyl) Ammonium Propionate, Yardımcı maddeler olarak: Benzotriazole korozyon inhibitörü, surfektan, excipient, kompleksleştirici ve esans içerir.

www.famed.com.tr

Cevizli Mah. Hacılar Cad. No:44/A Kartal / İstanbul | T: +90 216 597 0 567 - +90 216 441 29 99 F: +90 216 397 15 15