



# BIORAD®

## NCM QUAT

Endoskop ve  
Alet Dezenfeksiyon



### AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE şişe	20×1 L
5 litre PE bidon	4×5 L
10 litre PE bidon	1 adet

### KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Didesildimetilamonyumklorür, Benzalkonyumklorür, korozyon ve köpük inhibitörleri ve yardımcı maddeler.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

NCM QUAT tıbbi aletleri temizlemek ve dezenfekte etmek için kombine edilmiş quaterner amonyum bileşiklerinden alan, aldehit ve fenol içermeyen konsantre solüsyondur. Tüm materyallerle uyumluluk gösterir ve tüm bakteri, mantar, virüs türlerine karşı etkilidir.

### KULLANIM ALANLARI:

NCM Quat her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopi aletleri, flexible ve rijid endoskopların temizliği ve dezenfeksiyonunu sağlar. Cam, seramik, silikon, plastik, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerle uyumludur. Endoskop yıkama makinelerinde, ultrasonik yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygundur.

### KULLANIM ŞEKLİ

Tıbbi alet dezenfeksiyonlarında %1 dozda seyreltilerek kullanılır. (Örnek; 10 lt solüsyon hazırlamak için 9,9 lt suya 100ml solüsyon ekleyiniz.) Etki süresi 5 dakikadır. 15 gün etkinlik süresine sahiptir. Solüsyonda organik atık oluşumu veya gözle görülür bir kirlilik oluştuğunda değiştirilmesi tavsiye edilir.

### ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Virüsid, Tüberkülozid, Mikobakterisid.