



BIORAD®

POWERFUL PA

Endoskop ve
Alet Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE şişe	20×1 L
5 litre PE bidon	4×5 L
10 litre PE bidon	1 adet

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Perasetik asit, Hidrojen peroksit , Asetik Asit, Antikorozif maddeler ve yardımcı malzemeler

KULLANIM ALANLARI:

Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopi aletler, flexible ve rijid endoskopların yüksek düzey dezenfeksiyonunu sağlar.Endoskop kılıflarında paslanma,korozyon, yumuşama, renk değişikliği gibi zedelenmelere neden olmaz. Plastik,PVC,cam,silikon seramik,akrilik,polikarbon,polimer,polistren,HDPE,porselen vepaslanmaz çelik malzemelerden yapılmış tıbbi cihazların dezenfeksiyonuna uygundur.Her türlü endoskop markası ile kullanıma uygundur.Endoskop yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ

%3 oranında seyreltilerek kullanılır. Solüsyonu hazırlamak için dozaj pompasını kullanınız.Dezenfektan küvetine su doldurunuz. Seyreltme tablosuna bakarak Biorad Powerful Pa ekleyiniz.Enzim ile ön temizliği yapılmış aletleri demonte ederek,tüm yüzeyleri ve boşlukları solüsyonla temas edecek şekilde kaba yerleştiriniz.Küvetin ağzını kapatıp etki süresi kadar bekledikten sonra aletleri solüsyondan çıkarınız ve bol su ile durulayınız. Solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol edilmelidir.Solüsyonda gözle görülür bir kirlilik olduğunda değiştirilmesi tavsiye edilir. Otomatik endoskopi yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılırken üretici tarafından verilen kullanıcı talimatlarına uyunuz.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Sporosid, Virüsid, Tüberkülosid, Mikobakterisid.