



BIORAD®

RELIABLE

Endoskop ve Alet Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
5 litre PE bidon	4x5 L
10 litre PE bidon	1 adet

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Bis (3-aminopropyl)dodecylamin, Didecylmethylpoly(oxethyl) Ammonium Propionate, korozyon inhibitörü ve yardımcı maddeler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

RELIABLE, kullanıma hazır, yüksek etkili tıbbi alet dezenfektanıdır. Tıbbi aletlerin, flexible ve rijid endoskopların dezenfeksiyonu için kullanılan, fenol, klor ve formaldehit içermeyen ,renksiz,kokusuz,toksik olmayan kullanıma hazır alet dezenfektanıdır. Korozyon inhibitörü içerdiğinden, metal aksamli yüzeylerde rahatlıkla kullanılır. 5 dakikada dezenfeksiyon ve sterilizasyon yapar etkinliğini yitirmeden 14 gün kullanım özelliği vardır. Test stripleri ile kolayca kontrol edilebilir.

KULLANIM ŞEKLİ

Endoskop yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygundur.Solüsyonu dezenfektan küvetine doldurunuz.Enzimatik solüsyon ile ön temizliği yapılmış aletleri demonte ederek,tüm yüzeyleri solüsyonla temas edecek şekilde küvete yerleştiriniz, küvetin ağzını kapatınız. Ağız kapatılan küvet etki süresi kadar bekletildikten sonra aletleri solüsyondan çıkarınız bol su ile durulayınız.Solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol edilmelidir. Gözle görülür bir kirlilik olduğunda solüsyonun değiştirilmesi tavsiye edilir. Otomatik endoskopi yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılırken üretici tarafından verilen kullanıcı talimatlarına uyunuz

KULLANIM ALANLARI:

Reliable Solüsyonu, her türlü cerrahi aletin, ısıya dayanıksız anestezi aksesuarlarının (maske ambu, vb) ve Karl storz, Olympus, Pentax, Fujinon, flexible ve rijid gibi tüm endoskopların dezenfeksiyonu yanı sıra her türdeki cerrahi aletin, dental cerrahi malzemeler, frezler ve laparaskopi aletlerinin dezenfeksiyonu için çok uygundur. Endoskop kılıflarında paslanma,korozyon, yumuşama,renk değişikliği gibi zedelenmelere neden olmaz. Relaiable solüsyonu kauçuk, plastik, Pvc,akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerden yapılmış tıbbi cihazların dezenfeksiyonuna uygundur.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Virüsüd, Tüberkülosid, Mikobakterisid.

www.famed.com.tr