



BIORAD®

READY PLUS

Yer Yüzey
Dezenfektanları



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE şişe	20×1 L
5 litre PE bidon	4×5 L
10 litre PE bidon	1×10 L

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Benzalkonyumklorür, Didecyldimethylammoniumchloride, Korozyon inhibitörü ve yardımcı maddeler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Ready Plus konsantre bileşimindeki quaterner amonyum bileşikleri sayesinde antimikrobiyal etki spektrumu geniştir. Aldehit, fosfat, sülfat ve alkol içermez. Ready Plus, cam, seramik, silikon, plastik (pleksiglas dahil), ahşap ve paslanmaz çelik malzeme ile uyumludur. Her tür kalitede su ile etkinlik gösterir. Deterjan ve dezenfektan kombinasyonu mevcuttur. Kalıntı ve leke oluşturmaz.

KULLANIM ALANLARI:

Bileşimindeki quaterner amonyum bileşikleri sayesinde antimikrobiyal spektrumu geniştir. Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan tüm yer ve yüzeylerin hızlı dezenfeksiyonunda, hastanelerin tüm yatay ve dikey yüzeylerinde, pvc/epoksi alanların duvarların, ameliyathanelerin yoğun bakım odalarının temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Can, ahşap, sikon, seramik ve plastik malzemeler ve paslanmaz çelik malzemelerle uyumludur

KULLANIM ŞEKLİ

1 / 400 oranında seyreltilmiş solüsyon (10lt suya 25ml ürün eklenmek suretiyle) dezenfeksiyon ve temizlik yapılacak yüzeye ovalama ve silme metoduyla uygulanır.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid , Fungusid, Virüs, Mikobakterisid, Tuberkülosid

www.famed.com.tr