



BIORAD®

NCM QUAT PLUS

Endoskop ve
Alet Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE şişe	20×1 L
5 litre PE bidon	4×5 L
10 litre PE bidon	1 adet

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Dialkyldimethylamonyum klorür, korozyon ve köpük inhibitörleri, yardımcı malzemeler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

NCM QUAT Plus Amalgam seperatörlü cerrahi aspiratörlerin koruyucu dezenfeksiyonu ve bakımı için quaterner amonyum bileşikleriyle formüle edilmiş aldehytsiz konsantre bir üründür. Dezenfeksiyon ve aynı anda temizleme sağlar. Kötü kokuları giderir. Korozyon ve köpük inhibitörleri içerir. Aldehit, fenol, aktif klor içermez. Aktif klor içermediğinden amalgam kaynaklı civa gibi ağır metaller durağan olur.

KULLANIM KONSANTRASYONU:

Dental vakum sistemleri dezenfeksiyonlarında %2 seyreltilerek kullanılır. Örneğin; 1 litre solüsyonu hazırlamak için 40-60 °C'deki 980 ml sıcak suya 20 ml konsantreden ekleyiniz ve vakum ile çekiniz. Çalışma sıklığına göre gerektiğinde vakum ile emiş işlemini günde 2-3 kez tekrarlayınız.

KULLANIM ALANLARI:

NCM Quat Plus, Amalgam seperatörlü cerrahi aspiratörlerin dezenfeksiyonu ve temizliği ve bakımı için kullanımı önerilir. Tüm metallerle uyumluluk göstermesinin yanı sıra; Cam, seramik, silikon, plastik, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerle de uyumludur.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Virüs, Tüberküloz, Mikobakterisid

www.famed.com.tr