



# BIORAD®

## RAYD GUANIDE

Endoskop ve  
Alet Dezenfeksiyon



### AMBALAJ ŞEKİLLERİ

| Açıklama          | Ambalaj |
|-------------------|---------|
| 1 litre PE şişe   | 20×1 L  |
| 5 litre PE bidon  | 4×5 L   |
| 10 litre PE bidon | 1 adet  |

### KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Didecylmethylpoly(oxethyl) Ammonium Propionate, Bis(3-aminopropyl)laurylamin, Polyhexamethylene biguanide hydrochloride, korozyon ve köpük inhibitörleri ve yardımcı maddeler

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Rayd Guanide etkinliğini alkil aminopropil, guanide ve quaterner amonyum bileşiklerinden alır. Korozyon inhibitörleri ihtiva eder ve aldehit, fenol içermez, kokusuzdur, tüm materyallerle uyumluluk gösterir. Yüksek etkili konsantre dezenfektandır.

### KULLANIM ŞEKLİ

Tek bir işlemde kısa süreli dezenfeksiyon gerçekleştirir. Rayd Guanide solüsyonu MIC-cerrahisi, anestezi materyalleri ve bükülür ve bükülmez endoskoplar dâhil her tipteki tüm cerrahi aletlerin dezenfeksiyonu için uygundur. Rayd Guanide solüsyonu, her türlü cerrahi aletlerin, ısıya dayanıksız anestezi aksesuarlarının (maske ambu, vb) ve Karl Storz, Olympus, Pentax, Fujinon, flexible ve rijid gibi tüm sabit ve esnek endoskopların dezenfeksiyonu yanı sıra her türdeki cerrahi aletin ve laparoskopi aletlerinin dezenfeksiyonu için çok uygundur. Endoskop kılıflarında paslanma, korozyon, yumuşama, renk değişikliği gibi zedelenmelere neden olmaz.

### KULLANIM ALANLARI:

Ön temizliği yapılmış tüm aletleri demonte bir şekilde ,tüm yüzeyleri solüsyonla temas edecek şekilde küvete yerleştiriniz, küvetin ağzını kapatınız.Ağzı kapatılan küvet etki süresi kadar bekletildikten sonra aletleri solüsyondan çıkarınız bol su ile durulayınız.Solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol edilmelidir.Gözle görülür bir kirlilik oluştuğunda solüsyonun değiştirilmesi tavsiye edilir.Otomatik endoskopi yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılırken üretici tarafından verilen kullanıcı talimatlarına uyunuz. Rayd Guanide solüsyonu %1 oranında seyreltilerek kullanılır.(Örneğin 10lt solüsyonun hazırlanışında;9,9 lt suya 100 ml Rayd Guanide solüsyonu eklenir).Bu işlemde kullanılan Rayd Guanide solüsyonu en fazla 15 gün süre ile kullanılabilir.

### ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Sporosid, Virüs, Tüberkülosid, Mikobakterisid

[www.famed.com.tr](http://www.famed.com.tr)