



BIORAD®

READY FLASH

Endoskop ve
Alet Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
5 litre PE bidon	4x5 L
10 litre PE bidon	1 adet

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Gliksal, Gluteraldehit, Didecyl dimethyl ammonium chloride, korozyon inhibitörü ve yardımcı maddeler.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

READY FLASH Tıbbi aletlerin, flexible ve rijid endoskopların dezenfeksiyonu için kullanılan, fenol, klor ve formaldehit içermeyen ,renksiz, kokusuz, toksik olmayan yüksek etkili konsantre alet dezenfektanıdır.Korozyon inhibitörü içerdiğinden, metal aksamı yüzeylerde rahatlıkla kullanılır. 5 dakikada dezenfeksiyon ve sterilizasyon yapar etkinliğini yitirmeden maksimum 14 gün kullanım özelliği vardır. Test stripleri ile kolayca kontrol edilebilir.

KULLANIM KONSANTRASYONU:

Glutaral Extra solüsyonu %10 oranında seyreltilerek kullanılır.(Örneğin 10lt solüsyonun hazırlanışında;9 lt suya karşılık 1 lt glutaral extra solüsyonu kullanılır)

KULLANIM ALANLARI:

Ready Flash, Solüsyonu, her türlü cerrahi aletin, ısıya dayanıksız anestezi aksesuarlarının (maske ambu, vb) ve Karlstorz, Olympus, Pentax Fujinon, flexible ve rijid gibi tüm endoskopların dezenfeksiyonu yanı sıra her türdeki cerrahialetin, dental cerrahi malzemeler, frezler ve laparaskopi aletlerinin dezenfeksiyonu için çok uygundur. Endoskop kılıflarında paslanma,korozyon, yumuşama,renk değişikliği gibi zedelenmelere neden olmaz. Ready Flash solüsyonu kauçuk, plastik, Pvc,akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerden yapılmış tıbbi cihazların dezenfeksiyonuna uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ

Ön temizliği yapılmış tüm aletleri demonte ederek,tüm yüzeyleri solüsyonla temas edecek şekild küvete yerleştiriniz, küvetin ağzını kapatınız. Ağzı kapatılan küvet etki süresi kadar bekletildikten sonra aletleri solüsyondan çıkarınız bol su ile durulayınız. Solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol edilmelidir.Gözle görülür bir kirlilik oluştuğunda solüsyonun değiştirilmesi tavsiye edilir.Otomatik endoskopi yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılırken üretici tarafından verilen kullanıcı talimatlarına uyunuz. Rayd Guanide solüsyonu %2 oranında seyreltilerek kullanılır.(Örneğin 10lt solüsyonun hazırlanışında;9,8 lt suya 200 ml Ready Flash solüsyonu eklenir),Buişlemde kullanılan Ready Flash solüsyonu en fazla 15 gün süre ile kullanılabilir.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Sporosid, Virüs, Tüberkülozid, Mikobakterisid.

www.famed.com.tr